

HARTMANN

ES

Tiritas[®] MEDICAL

Reductor de Cicatrices Redutor de Cicatrizes

Instrucciones de uso Instruções de utilização

 Laboratorios HARTMANN S.A.
Carrasco i Formiguera, 48
08302 Mataró

PT – PAUL HARTMANN LDA
2685-378 Prior Velho



1. ¿Qué es Tiritas Medical Reductor de Cicatrices?

1.1 ¿Qué contiene una caja de Tiritas Medical Reductor de Cicatrices?

2. ¿Qué beneficios tiene el tratamiento Tiritas Medical Reductor de Cicatrices?

3. ¿Cuál es su modo de acción?

4. ¿Cuándo utilizar Tiritas Medical Reductor de Cicatrices?

4.1 ¿Cómo utilizar Tiritas Medical Reductor de Cicatrices?

5. ¿Cuál es la duración del tratamiento?

1. ¿Qué es Tiritas Medical Reductor de Cicatrices? Tiritas Medical Reductor de Cicatrices es un apósito de gel de silicona que previene, aplanar y reduce diferentes tipos de cicatrices.

1.1 ¿Qué contiene una caja de Tiritas Medical Reductor de Cicatrices? Existen dos presentaciones:

REF 999403: 5 apósitos de 7,2x5 cm para pequeñas cicatrices.

REF 999404: 5 apósitos de 4x30 cm para cicatrices más grandes.

Ambas presentaciones contienen un estuche de plástico para guardar el apósito reutilizable cuando no se esté usando. El estuche contiene una/varias láminas protectoras para guardar el apósito cuando no está en uso.

2. ¿Qué beneficios tiene el tratamiento Tiritas Medical Reductor de Cicatrices?

- Reduce el tamaño, el grosor y la visibilidad de la cicatriz.
- Disminuye el enrojecimiento / pigmentación de la cicatriz mejorando su aspecto.
- Disminuye la sensación de prurito / picor.
- Disminuye la sensación de tensión alrededor de la cicatriz haciéndola más flexible.
- Mejora el aspecto de la piel alrededor de la cicatriz.

3. ¿Cuál es su modo de acción?

Tiritas Medical Reductor de Cicatrices se basa en los principios de la oclusión, la hidratación y la compresión de los apósitos de geles de silicona, causando los siguientes efectos en la piel tras el tratamiento:

- Aumenta la hidratación de la capa córnea de la piel.

- Minimiza el picor y el malestar asociado a la cicatriz.
- Protege el tejido cicatrizado de bacterias externas (barrera bacteriana).
- Limita la producción de colágeno que causa el aumento del grosor de la cicatriz.
- Minimiza la pigmentación o rojez de la cicatriz.
- Mejora la flexibilidad de la cicatriz.

4. ¿Cuándo utilizar Tiritas Medical Reductor de Cicatrices?

Tiritas Medical Reductor de Cicatrices se debe utilizar una vez la herida esté completamente cerrada. En el caso de una intervención quirúrgica, se debe esperar dos semanas una vez retirados los puntos de la herida.

Está indicado para el tratamiento de:

- Cicatrices queloides, hipertróficas, contracturadas y atróficas (derivadas del acné).
- Heridas cerradas recientemente con el fin de minimizar el grosor de las cicatrices y mejorar su aspecto.

4.1 ¿Cómo utilizar Tiritas Medical Reductor de Cicatrices?

Aplicar Tiritas Medical Reductor de Cicatrices sobre la piel limpia y seca. Retirar la lámina protectora del apósito. Adherir cuidadosamente el apósito a la cicatriz cubriendo bien toda el área a tratar. Los apósitos de silicona son reutilizables y lavables con agua y jabón; un mismo apósito se puede reutilizar hasta 7 días. Al cabo de 7 días o bien cuando el apósito ya no adhiere a la piel, cambie el apósito. El apósito se puede recortar al tamaño deseado siempre que cubra por completo todo el área de la cicatriz más aproximadamente un centímetro adicional por cada lado.

Recomendamos retirar el apósito de silicona a diario, lavarlo con agua y jabón, y dejarlo secar antes de volver a aplicarlo. Para mantener una correcta higiene, también deben lavarse con agua y jabón la lámina protectora del apósito y el estuche de plástico. Se recomienda usar la lámina protectora que hay dentro de la petaca mientras el apósito no esté en uso.

Para obtener unos resultados óptimos se

069 8208 (1117)

recomienda su uso entre 12 y 24 horas al día. Se recomienda dejar la cicatriz descubierta durante cortos periodos de tiempo, especialmente en el caso de sudoración prolongada o en el momento de practicar deporte.

La retirada del producto no produce dolor. Tiritas Medical Reductor de Cicatrices están dermatológicamente testadas en pieles sensibles.

Si aparecen reacciones adversas durante su utilización, discontinuar el tratamiento y empezar de nuevo incrementando paulatinamente el uso. Si la reacción persiste, consultar a su médico o a su farmacéutico.

5. ¿Cuál es la duración del tratamiento?
Los primeros signos de mejora del tratamiento Tiritas Reductor de Cicatrices son apreciables transcurridas 4-5 semanas de uso. Para maximizar los resultados, se recomienda el uso de Tiritas Medical Reductor de Cicatrices de forma continuada durante mínimo 3 meses utilizando los apósitos de silicona de 12-24 h al día.

Fecha de revisión del texto: 11.2017

PT

1. O que é Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes?

1.1 O que contém uma embalagem de Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes?

2. Quais os benefícios do tratamento com Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes?

3. Qual o seu modo de ação?

4. Quando utilizar Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes?

4.1 Como utilizar Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes?

5. Qual a duração do tratamento?

1. O que é Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes? Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes é um penso em gel de silicone que previne, alisa e reduz diferentes tipos de cicatrizes.

1.1 O que contém uma embalagem de Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes?

Existem duas apresentações:

REF 999403: 5 pensos de 7,2x5 cm para pequenas cicatrizes

REF 999404: 5 pensos de 4x30 cm para cicatrizes de maiores dimensões

Ambas as apresentações contêm uma embalagem de plástico para conservar o penso reutilizável, quando não se está a usar. A embalagem contêm uma/várias películas de proteção para armazenar o penso quando não se está a usar.

2. Quais os benefícios do tratamento Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes?

- Reduz o tamanho, a espessura e a visibilidade da cicatriz.
- Diminui a vermelhidão/pigmentação da cicatriz, melhorando o seu aspeto.
- Reduz a sensação de prurido/ardor.
- Reduz a sensação de tensão ao redor da cicatriz, tornando-a mais flexível.
- Melhora o aspeto da pele em volta da cicatriz.

3. Qual o seu modo de ação?

Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes baseia-se nos princípios da oclusão, hidratação e compressão dos pensos em gel de silicone, causando os seguintes efeitos na pele após o tratamento:

- Aumenta a hidratação da camada córnea da pele.
- Diminui o ardor e o mal-estar associado à cicatriz.
- Protege o tecido cicatrizado de bactérias exteriores (barreira bacteriana).
- Limita a produção de colagénio, que provoca o aumento da espessura da cicatriz.
- Diminui a pigmentação ou vermelhidão da cicatriz.
- Melhora a flexibilidade da cicatriz.

4. Quando se deve utilizar Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes? Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes deve ser utilizado quando a ferida está completamente fechada. No caso de uma intervenção cirúrgica, deve aguardar-se duas semanas após remoção das suturas. Está indicado para o tratamento de:

- Cicatrizes queloides, hipertróficas, contraturadas e atróficas (originadas pelo acne)
- Feridas de cicatrização recente, com o objetivo de diminuir a espessura das cicatrizes e melhorar o seu aspeto

4.1 Como utilizar Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes? Retirar a película protetora do penso. Aplicar Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes sobre a pele limpa e seca, cobrindo bem toda a zona a tratar. Os pensos de silicone são reutilizáveis e laváveis com água e sabão; o penso pode ser reutilizado até 7 dias. Mudar o penso após 7 dias ou quando a aderência do mesmo tiver sido perdida. O penso pode ser recortável ao tamanho desejado, desde que cubra por completo toda a área da cicatriz mais 1 cm adicional para cada lado.

Recomendamos retirar diariamente o penso de silicone, lavar com água e sabão e deixar secar antes de nova aplicação. Por questões de higiene, o recipiente plástico e a película protetora do penso devem ser também higienizados. Recomenda-se a utilização da película protetora quando não utilizar o penso.

Para resultados ideais, recomenda-se a sua utilização entre 12 a 24 horas por dia. Recomenda-se deixar a cicatriz descoberta durante curtos períodos de tempo, especialmente em caso de transpiração prolongada ou durante a prática de desporto.

A remoção do penso é indolor.

Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes foi dermatologicamente testado em peles sensíveis.

Em caso de reações adversas durante a sua utilização, descontinuar o tratamento e reiniciar o uso gradualmente. Caso a reação persista deve contactar o seu médico ou farmacéutico.

5. Qual a duração do tratamento?

Os primeiros sinais de melhoria devido ao tratamento com Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes são visíveis após 4-5 semanas de utilização. Para maximizar os resultados, recomenda-se o uso de Tiritas Medical Redutor de Cicatrizes de forma continuada durante um período mínimo de 3 meses, utilizando os pensos de silicone 12-24 horas por dia.

Data de revisão do texto: 11.2017